



Flip-up -luppien käyttöohje




Onnittelut hyvästä hankinnasta!

Lupit on mittasäädetty parhaan työskentelyasentosi mukaisesti juuri sinulle sopiviksi. Valitse aluksi rauhallisia tilanteita työkokeiluun. Potilasta tarpeen mukaan kääntelemällä pystyt työskentelemään suurimman osan ajasta hyvässä työasennossa. Lupit saa helposti käännettyä ylös toimenpiteissä, joissa niitä ei tarvitse tai pysty käyttämään.

Käyttöohjeeseen tutustumalla saat parhaan hyödyn irti lupeistasi.


Flip-up -toiminto

Parhaan kuvan kohteesta saa silloin kun lupit ala-asennossaan koskettavat silmälasilinssejä tai silmälasikehyksen reunaa.

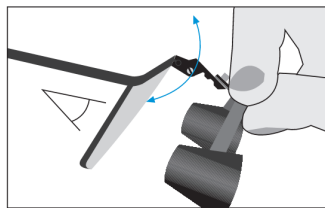

Herkkätoiminen flip-up

Kosketa vain helposti puhdistettavaa metallista otekohtaa (lupien rungon keskellä) kääntäessäsi luppeja ylös ja alas työn aikana.

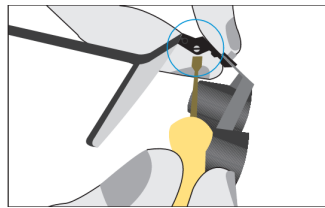


Saranan kitkan säätäminen

Uusi sarana voi tarvita säätöä alkukäytön jälkeen. Älä kiristä liikaa, riittää kun lupit pysyvät paikallaan sekä ylä- että ala-asennoissaan.

Luppien irrottaminen ja kiinnittäminen

Lupeissa oleva saranaosa irtoaa ja kiinnittyy vain luppien ollessa käännettynä yläasentoon.

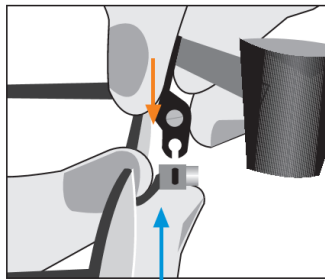

Kiinnittäminen silmäläseihin

Tue sormella nupin alapuolelta ja paina saranaosa nupin akseliin suoraan ylhäältä pohjaan saakka.


Irrottaminen silmäläseistä

Vedä saranasta vastaavasti ylöspäin. Sarana irtoaa nupista helposti oikeaan suuntaan vedettäessä.

Työskentelyetäisyyden hienosäätö

Lupeissa on esisäädettynä mitattu työskentelyetäisyytesi, mutta sitä voi olla tarpeellista hienosäätää jälkikäteen. Säätö on helppo ja tärkeää tehdä, koska työskentely syvyystarkkuusalueen keskikohtalla ehkäisee silmiä rasittumasta ja antaa maksimaalisen liikkumavaran lähemmäs ja kauemmas kohteesta.

Luppien työskentelyetäisyyttä säädetään kiertämällä sisimpiä linssejä reunan loviin asetetulla työkalulla

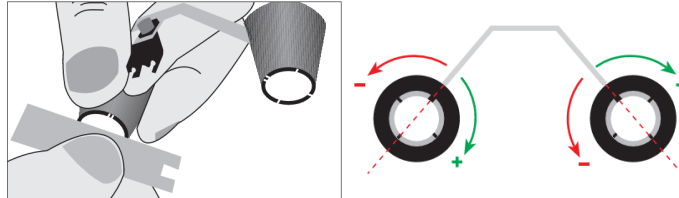

- Irrota lupit silmälasista.
- Ota tukeva ote luppikartiosta ja aseta työkalu loviin.
- Myötäpäivään (+) kiertäminen lisää ja vastapäivään (-) kiertäminen lyhentää työskentelyetäisyyttä. Neljäsosakerros (90 astetta) muuttaa etäisyyttä luppimallista riippuen seuraavasti:

EASY (2.0x) 1.0 cm

ERGO (2.6x) 1.5 cm

ENDO (3.0x) 2.0 cm

ENSI (1.7x) Ei etäisyysäätömahdollisuutta

- Kierrä molempia linssejä aina saman verran ja samaan suuntaan. Leveät lovet ovat tasamerkkejä, joiden tulee aina olla runkoon nähden samassa vaiheessa.
- Etene neljäsosakerros kerrallaan ja kokeile vaikutusta.

Puhdistaminen

Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta lupit on helppo puhdistaa. Mukana toimitettava mikrokuituliina on paras väline sekä luppien että silmälasien puhdistamiseen. Etäisyysäättömekanisminsa vuoksi lupit eivät ole täysin vesitiiviit, mutta ne voi silti pyyhkiä kostealla liinalla. Luppikartioidiin upotettujen okulaarilinssien puhdistaminen onnistuu hyvin pumpulipuikolla.

Perusteellista puhdistamista varten lupit kannattaa irrottaa silmälaseista, jolloin silmälasit voi pestä erikseen.

Suosittelavat puhdistusaineet

- Silmälasien puhdistamiseen tarkoitetut aineet
- Astianpesuaineet (vesiliuoksena)

Pesuainejäämiä luppien saranaosassa ja silmälasien nuppiosassa tulee välttää, sillä ne saattavat vaikuttaa flip-up –mekanismin kitkaan.

Desinfiointi

- Luppien kaikki osat voi desinfioida 70% alkoholilla.

Käyttö ja säilytys huoneenlämpötilassa.



Ei saa upottaa veteen



Ei saa pestä juoksevan veden alla

www.MOptics.fi

© MeridentOptergo Oy 2015
Suunniteltu ja valmistettu käsityönä Suomessa.
Worldwide Pat. & Pat. Pend.

